



defibrion

AED- EN BHV-SPECIALIST

Agenda

- Lifepak CR2 in het kort
- Vervangen elektroden en batterij; hoe vaak en hoe?
- Uitlezen AED na inzet
- Updaten van software
- Tracken van de AED
- Beheer op afstand
- MDR richtlijnen 2020



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
Lifepak CR2 AED

- **De AED met de kortste tijd tot schok van 360J**
 - Halfautomaat < 7 seconden
 - Volautomaat < 13 seconden
- **CPRinsight technologie**
 - Analyseert tijdens borstcompressies of een schok kan worden toegediend
- **ClearVoice technology**
 - Detecteert achtergrondgeluiden en past het volume van de instructie hierop aan.
- **Hoogst beschikbare toenemende energieniveau**
 - Tot 360J voor effectievere schokken indien nodig (standaard: 200J, 300J, 360J)
- **LIFELINKcentral AED programmabeheer**
 - Ontvang meldingen over de AED status en AED locaties



Vervangen elektroden en batterij; hoe vaak en hoe?

- Elektroden levensduur 4 jaar
- Batterij levensduur 4 jaar
- 90/60/30 dagen melding verstuurd




Uitlezen AED na inzet

- Op locatie d.m.v. USB-kabel en via DT Express software
- Ziekenhuizen aangesloten op LIFENET? Rechtstreeks versturen data mogelijk

Updaten van software

- Automatisch
- Handmatig mogelijk via Lifelink

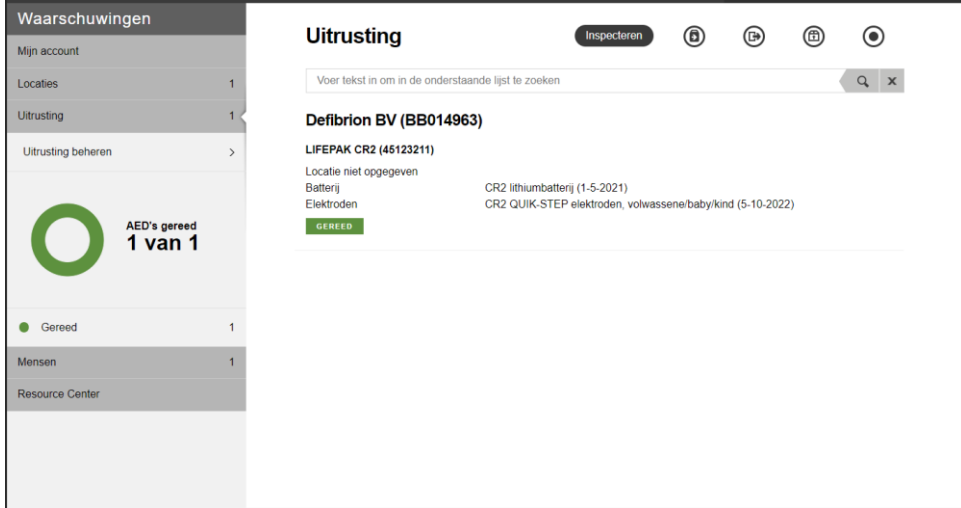

Waarschuwingen

- Mijn account
- Locaties 1
- Uitrusting 1
- Uitrusting beheren >

AED's gereed 1 van 1

- Gereed 1
- Mensen 1
- Resource Center

Uitrusting Inspecteren 🔍 🔍 🔍 🔍

Voer tekst in om in de onderstaande lijst te zoeken 🔍 ✕

Defibrion BV (BB014963)

LIFEPAK CR2 (45123211)

Locatie niet opgegeven


Batterij CR2 lithiumbatterij (1-5-2021)

Elektroden CR2 QUIK-STEP elektroden, volwassene/baby/kind (5-10-2022)

GEREED

Tracken van de AED

- Lifelink
- Wifi
- 3G (e-mailnotificatie en locatie melden bij benadering)

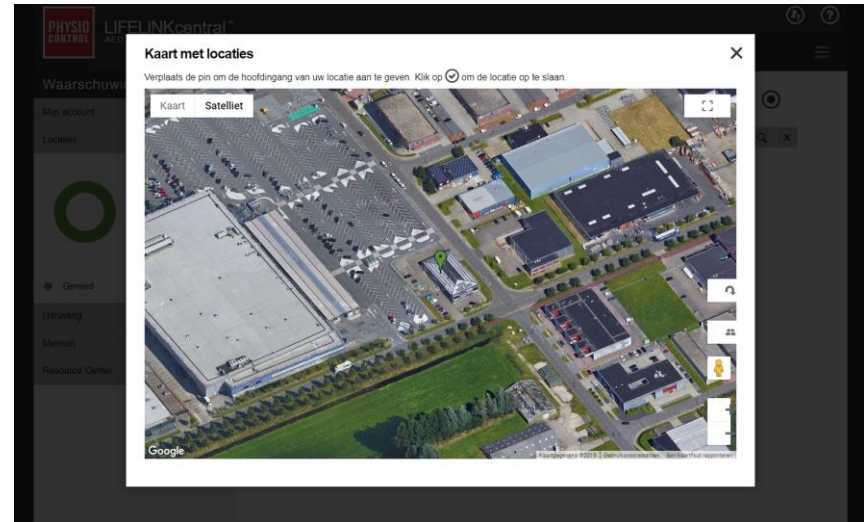

Beheer op afstand

- Bewaken van de status van de AED
- AED-inspectie (maandelijks/handmatig)
- Installeren van software-updates
- E-mail notificatie vervangen batterij en elektroden
- E-mail notificatie na (tijdens) een inzet
- Configureren van de AED (setup) (WiFi)



MDR richtlijnen mei 2020

- Dit betekent dat er géén nieuwe AED-modellen mogen worden geïntroduceerd op de Europese markt zonder MDR goedkeuring
- Vanaf 2024 mogen fabrikanten in Europa geen AED's meer verkopen die niet voldoen aan de MDR
- Alle Stryker (HeartSine & Lifepak) producten voldoen hieraan



HeartSine Gateway (NIEUW)

HeartSine Samaritan Connected AED (HeartSine Gateway)

- Traceer uw AED gereedheid status
- Ontvang e-mail notificaties via uw online klantportaal
- Zelfstandige monitor (dagelijks)
 - batterij status
 - omgevingstemperatuur
 - software
 - Wi-Fi connectie
 - connectie tot AED





defibrion

AED- EN BHV-SPECIALIST